



**Evaluación ecográfica de la
permeabilidad tubárica en
mujeres con infertilidad
confirmada o sospechada**

El Procedimiento HyFoSy Rápido. Suave. Efectivo.

Encontrar tiempo para una nueva cita para una prueba de fertilidad puede ser estresante, y esperar los resultados aún más. El Procedimiento HyFoSy con ExEm® Foam se puede realizar en la comodidad del consultorio de su ginecólogo. Esto le permite a su médico proporcionarle los resultados de su prueba de permeabilidad tubárica en tiempo real, para que pueda continuar con su proceso de fertilidad sin demora.

Si tiene o sospecha infertilidad, ExEm® Foam (espuma intrauterina (de polímero de aire tipo A)) puede ayudarla a obtener las respuestas que necesita de forma rápida, segura y precisa al inicio de su camino de fertilidad.

El funcionamiento de ExEm® Foam es simple: si sus trompas están permeables (abiertas), la espuma aparecerá como una delgada línea blanca brillante al ser visualizada por su proveedor de la atención de la salud mediante una ecografía. Si la línea blanca no aparece, es posible que sus trompas de Falopio estén ocluidas o bloqueadas.

¿Qué significa la permeabilidad tubárica y por qué es importante?

La permeabilidad tubárica se refiere a si sus trompas de Falopio están permeables (abiertas) u ocluidas (bloqueadas). Para que un óvulo ovulado sea fecundado dentro de una trompa y viaje a través de las trompas de Falopio, la trompa debe estar permeable (abierta).

Evaluación de la permeabilidad tubárica mediante ecografía

Su médico le ha recomendado un procedimiento para evaluar la permeabilidad (o apertura) de sus trompas de Falopio. Solo con una ecografía y ExEm® Foam, su médico examinará sus trompas de Falopio.

La ecografía con espuma de histerosalpingografía (HyFoSy) es menos dolorosa que la radiografía HSG.¹ Además, evita la radiación y el yodo, y recibirá los resultados el mismo día, lo que le permitirá a usted y a su médico hablar sobre los próximos pasos en su camino hacia la fertilidad sin demora.

Consulte el reverso de este folleto y la información de prescripción completa para obtener información importante sobre la seguridad de ExEm® Foam y el Procedimiento HyFoSy.

Preparación



El procedimiento debe realizarse en la fase preovulatoria de su ciclo menstrual (días del ciclo 6 al 11). Esto ocurre después de que el sangrado haya cesado, pero antes de que se produzca la ovulación.

Es importante tener una prueba de embarazo negativa 24 horas antes del procedimiento.

Inmediatamente antes del procedimiento, deberá vaciar la vejiga para asegurar una visualización óptima.

Sobre el Procedimiento

Durante el procedimiento, se infunde ExEm® Foam en el útero y las trompas de Falopio. Se utiliza una ecografía para observar el recorrido de la espuma. El procedimiento dura de 10 a 15 minutos. No requiere rayos X, yodo ni la colocación de un tenáculo cervical ni tracción sobre el cuello uterino, lo cual puede resultar doloroso para algunas pacientes.¹ La ExEm® Foam está hecha de ingredientes suaves similares a las lágrimas artificiales.

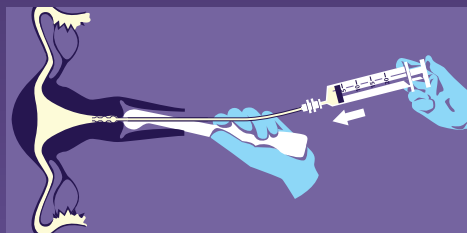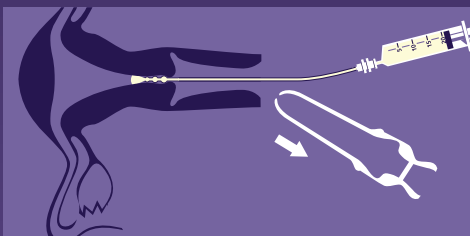

¹ Dreyer, K., Out, R. et al. Hysterosalpingo-foam sonography, a less painful procedure for tubal patency testing during fertility workup compared with (serial) hysterosalpingography: A randomized controlled trial. [Ecografía con hysterosalpingografía con espuma, un procedimiento menos doloroso para la prueba de permeabilidad tubárica durante la evaluación de fertilidad en comparación con la hysterosalpingografía (seriada): Un ensayo clínico aleatorizado y controlado]. Fertility and Sterility 2014, 102(3):821-25

1 Durante el procedimiento, se sentará en la silla de ginecología con los pies en los estribos. Su médico insertará un espéculo para visualizar el cuello uterino.

2 Se coloca un tubo delgado (catéter) en el cuello uterino. Luego, se retira el espéculo y se inserta la sonda de ultrasonido en la vagina.

La ExEm® Foam se infunde suavemente a través del catéter. La espuma permite visualizar el contorno de la cavidad uterina y las trompas de Falopio. Aunque el procedimiento en sí no suele causar dolor, algunas pacientes experimentan cólicos uterinos leves.

4 Con pequeños movimientos de la sonda de ultrasonido, su médico evaluará sus trompas de Falopio y determinará su permeabilidad.

5 Al finalizar, se retiran la sonda de ultrasonido y el catéter.

6 Su proveedor de la atención de la salud le informará sobre los resultados de sus pruebas el mismo día en la comodidad de su consultorio.

➤ *Después del procedimiento*

Después del procedimiento, es posible que observe una pequeña cantidad de secreción espumosa y/o manchado.

Esto es normal y se le proporcionará una toallita sanitaria si la necesita. Su médico le explicará los resultados y los pasos recomendados. Si tiene alguna pregunta o inquietud antes o después del procedimiento, comuníquese con su proveedor de la atención de la salud.



➤ **Información de seguridad importante**

No debe usar ExEm® Foam si está embarazada, tiene o sospecha que tiene inflamación o infección del tracto genital inferior, se ha sometido a un procedimiento ginecológico en los últimos 30 días, presenta sangrado vaginal o tiene o sospecha de neoplasia del tracto reproductivo.

Los efectos secundarios comunes del Procedimiento HyFoSy con ExEm® Foam incluyen: dolor pélvico y abdominal, reacciones vasovagales (y síntomas asociados como náuseas y desmayos) y manchado posterior al procedimiento. Consulte la información completa de prescripción (disponible en www.exemfoam.com/resources) o escanee el código QR a continuación con su dispositivo inteligente:



ESCANEE PARA OBTENER LA INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN

Se le recomienda informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch o llame 1.800.FDA.1088.

➤ **Acerca de la espuma intrauterina (polímero de aire tipo A) ExEm® Foam**

ExEm® Foam es el único agente de contraste aprobado por la FDA para la ecografía de permeabilidad tubárica en mujeres con infertilidad confirmada o sospechada.

Lanzada por primera vez en Europa en 2011, ExEm® Foam se ha utilizado para evaluar más de un millón de trompas de Falopio en todo el mundo, lo que representa una alternativa segura y eficaz a la HSG con rayos X.

ExEm® Foam Inc.
315 Deaderick Street
Suite 1700, Office 1735
Nashville, TN 37238



**Más conveniente.
Utilizada con éxito.**



1.888.963.EXEM (3936)



contact@exemfoam.com



www.exemfoam.com